



CRIOLIPOLISIS SLIMMING COOL

CRIOLIPOLISIS SLIMMING COOL




DESCRIPCIÓN

Es un equipo innovador diseñado para tratamientos de reducción de grasa localizada mediante la tecnología de criolipólisis 360. Este dispositivo utiliza enfriamiento controlado, combinado con vacío y luz LED, para inducir de manera no invasiva la apoptosis de las células grasas, logrando una disminución de hasta un 30% del tejido adiposo en áreas específicas del cuerpo. El sistema cuenta con una pantalla táctil LCD de 15,6 pulgadas, lo que facilita su uso y configuración. Incluye 5 cabezales intercambiables, adaptables a diversas zonas corporales, desde áreas pequeñas como la papada, hasta zonas más amplias como abdomen, brazos y muslos.

Su avanzado sistema de refrigeración asegura temperaturas constantes y seguras para la emulsión de grasa sin causar daños a los tejidos circundantes, brindando resultados efectivos y sin efectos secundarios. Este equipo está preparado para un uso intensivo continuo de hasta 18 horas, lo que lo convierte en una herramienta ideal para clínicas estéticas. El tratamiento es seguro, indoloro y altamente efectivo, siempre que sea operado por profesionales capacitados siguiendo las instrucciones proporcionadas por IMEC.

ANÁLISIS Y USO

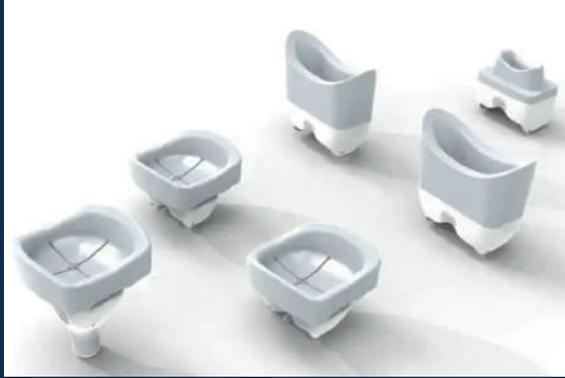

El procedimiento de criolipólisis con el Slimming Cool comienza seleccionando la zona a tratar y aplicando una membrana anti-congelante para proteger la piel. Luego, se coloca el cabezal adecuado, que utiliza aspiración al vacío para fijar el tejido adiposo. El equipo aplica un enfriamiento controlado, disminuyendo la temperatura gradualmente hasta un rango de $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $-11\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante el tiempo configurado (usualmente 60 minutos). Este enfriamiento induce la apoptosis celular, eliminando las células grasas de forma natural a través del sistema linfático. Al finalizar, se retira el cabezal y se realiza un masaje para estimular el drenaje linfático y potenciar los resultados

Áreas de Aplicación

Abdomen y flancos: Ideal para eliminar grasa persistente en zonas de difícil reducción.

Muslos: Reducción de grasa en áreas internas, externas y posteriores.

Brazos: Tonificación y eliminación de grasa localizada en las extremidades superiores.

Papada: Tratamiento preciso para grasa submentoniana.

Espalda y glúteos: Definición y mejora del contorno corporal.

BENEFICIOS Y RESULTADOS

Beneficios del Procedimiento

- *No invasivo y seguro: Sin necesidad de cirugías ni tiempos de recuperación.*
- *Efectos permanentes: Las células grasas destruidas no se regeneran.*
- *Personalizable: Configuración adaptable a cada paciente y área tratada.*
- *Multifuncional: Cabezal versátil para diferentes zonas del cuerpo.*
- *Compatibilidad con otros tratamientos: Puede combinarse con tecnologías como radiofrecuencia o ultrasonido para potenciar resultados.*



Resultados:

Reducción permanente de hasta un 30% de grasa localizada en las áreas tratadas.


Mejora del contorno corporal en zonas como abdomen, flancos, muslos, brazos y papada.

Eliminación eficaz de depósitos de grasa resistentes a dieta y ejercicio. Estimulación del drenaje linfático para una eliminación natural de las células grasas.

Piel más firme y uniforme en las zonas tratadas.

Procedimiento seguro sin daño a tejidos circundantes ni tiempo de recuperación.

Resultados visibles en pocas semanas y mejorados progresivamente hasta 3 meses.

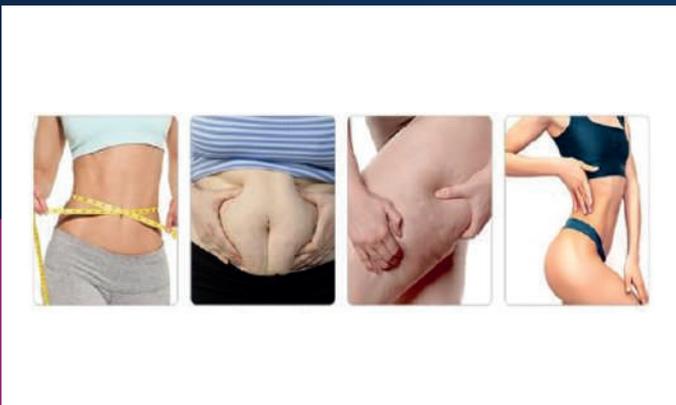



CRIOLIPOLISIS SLIMMING COOL

Especificaciones Técnicas

<i>Potencia</i>	1000W fusible 15°	<i>Aspiracion</i>	al vacío 1-5 engranajes (10-50Kpa)
<i>Enfriamiento/ calentamiento</i>	1-5 engranajes (temperatura de enfriamiento de 1 a -11 °C) / 0-4 engranajes (precalentamiento durante 3 minutos, temperatura de calentamiento °C 37 A 45°C)	<i>Tiempo de configuracion</i>	1-99min (predeterminado 60min).
		<i>Voltaje</i>	110V / 220V



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec