



DERMAPEN NEGRO

DERMAPEN NEGRO



DESCRIPCIÓN

Es un dispositivo de microneedling profesional diseñado para tratamientos de rejuvenecimiento facial y corporal. Utiliza microagujas ajustables de 0 a 2,5 mm que estimulan la producción natural de colágeno y elastina, mejorando la firmeza, elasticidad y textura de la piel. Su sistema de velocidad variable permite adaptar la intensidad según las necesidades del tratamiento. Es ideal para reducir cicatrices, líneas de expresión, poros dilatados y estrías. Ofrece resultados visibles de regeneración y luminosidad sin procedimientos invasivos, promoviendo una piel más saludable, uniforme y revitalizada.

ANÁLISIS Y USO



Preparación: Desinfectar la piel y colocar un cartucho nuevo y estéril de microagujas.

Ajuste: Regular la longitud de la aguja (0–2.5 mm) y la velocidad según el tipo de piel y área a tratar.

Aplicación: Deslizar suavemente el dispositivo en movimientos horizontales, verticales y diagonales sobre la zona deseada.

Finalización: Aplicar un suero o producto regenerador para potenciar los resultados.

Mantenimiento: Desechar el cartucho tras cada uso y limpiar el equipo con desinfectante adecuado.



DERMAPEN NEGRO

Especificaciones Técnicas

Modelo: A7

Tipo: Dispositivo de microneedling facial y corporal

Alimentación: Cableado (energía continua)

Velocidad: Ajustable, entre

Cartuchos compatibles: 12 pines, 36 pines y nano (desechables)

Material: Aleación de aluminio y policarbonato

Peso: Aproximadamente 320 g

Uso: Profesional, para tratamien-



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec