



SHR + IPL



DESCRIPCIÓN

El equipo médico estético SHR + IPL combina la tecnología avanzada de Luz Pulsada Intensa (IPL) con el Sistema de Pulso Óptimo (OPT), ofreciendo una solución eficaz, versátil y segura para tratamientos estéticos. Este dispositivo permite realizar depilación permanente, rejuvenecimiento de la piel, eliminación de acné, reducción de arrugas y tratamiento de manchas y lesiones vasculares.

Su tecnología SHR brinda una experiencia casi indolora al utilizar un movimiento continuo y un sistema de enfriamiento avanzado con punta de zafiro a -5°C . Es adecuado para todo tipo de piel y cabello, maximizando la comodidad y seguridad del paciente. La lámpara tiene una durabilidad superior a 200,000 disparos, garantizando eficiencia a largo plazo. Su interfaz intuitiva con pantalla táctil a color de 8 pulgadas facilita su uso. El sistema cuenta con refrigeración por agua, aire y semiconductores, asegurando un funcionamiento estable. Es una solución integral para clínicas estéticas modernas.

ANALISIS Y USO



1. *Preparación del cliente:* Limpia y desinfecta el área a tratar para eliminar restos de productos o aceites. Rasura el área (si es depilación) para evitar que el vello superficial absorba la energía. Aplica gel frío sobre la piel para mejorar la transmisión de la luz y proteger la epidermis.

2. *Configuración del equipo:* Enciende el equipo y selecciona el modo de tratamiento adecuado (depilación, rejuvenecimiento, eliminación vascular, etc.). Ajusta la longitud de onda, energía y frecuencia según el tipo de piel, cabello y zona a tratar. Realiza una prueba en un área pequeña para verificar tolerancia y eficacia.

3. *Aplicación del tratamiento:* Desliza suavemente la pieza de mano sobre la piel con movimientos continuos, asegurándote de cubrir toda el área. Usa la tecnología SHR para tratamientos indoloros, manteniendo el cabezal en contacto constante con la piel. Supervisa la temperatura de la pieza de zafiro para garantizar la comodidad del cliente.

4. *Postratamiento:* Retira el gel sobrante y limpia la piel. Aplica una crema hidratante o calmante, y recuerda evitar la exposición al sol en las próximas 48 horas. Proporciona al cliente instrucciones de cuidado posterior específicas según el tratamiento realizado.

BENEFICIOS Y RESULTADOS

Beneficios

- Multifuncionalidad
- Apto para todos los tipos de piel y cabello
- Tratamientos rápidos e indoloros
- Resultados visibles en menos sesiones
- Reducción del costo operativo
- Seguridad garantizada
- Interfaz amigable



Resultados:

- Depilación Permanente
- Rejuvenecimiento Facial y Corporal
- Reducción de Manchas y Pigmentaciones
- Disminución de pecas, manchas solares y melasma para una piel más uniforme.
- Eliminación de Lesiones Vasculares
- Tratamiento de Acné
- Disminución de Arrugas





SHR + IPL

Especificaciones Técnicas

<i>Área de iluminación</i>	15*50 mm (e-light) 10*40 mm (OPT)	<i>Frecuencia OPT</i>	1-10 Hz
<i>Ancho de pulso ajustable</i>	2-99 ms (e-light) 0.1-70 ms (OPT)	<i>Potencia total</i>	2000 W
<i>Rango espectral</i>	430/480/530/640-1200 nm (e-light) 640-1200 nm (OPT)	<i>Voltaje</i>	AC 220V
<i>Energía IPL</i>	T1-50 J/cm ²	<i>Peso</i>	50 kg
		<i>Temperatura de enfriamiento</i>	Punta de zafiro: hasta -5 °C



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec